

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Dipartimento Cure Primarie

PRESCRIZIONE DI AUSILI ASSISTENZIALI

*Guida per i Medici di Medicina
Generale*

giugno 2012

Chi sono gli aventi diritto:

- Chi ha una invalidità civile accertata, se l'ausilio prescritto ha corrispondenza con le patologie certificate
- Chi ha presentato la domanda di invalidità con accompagnamento (art. 1 della legge 11/02/1980 n. 18)

Percorso

- Il MMG prescrive gli ausili sul modulo allegato in fac-simile (disponibile sul portale SOLE e presso gli uffici SAUB).
- L'utente/famigliare consegna la prescrizione e la documentazione attestante il diritto all'ausilio (Cert. Invalidità) all'UFFICIO ASSISTENZA PROTESICA.
- Quando la prescrizione è autorizzata, l'assistito verrà contattato telefonicamente sulle modalità del ritiro.

Uffici e orari

- CUP presso il Polo Territoriale Città di Imola viale Saffi, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12, il martedì e giovedì dalle 14 alle 17.30. Tel. 0542 604508.
- Per gli assistiti residenti nel Comune di Medicina la documentazione può essere consegnata anche al CUP presso il Polo Sanitario dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.30; sabato dalle 7.30 alle 12
- Gli ausili vengono ritirati presso il Centro Gestione Ausili il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12. Tel. 0542 604140
- Gli ausili con importante ingombro (letti e sollevatori) vengono consegnati al domicilio e lasciati dal personale addetto al piano campagna.

AUSILI PRESCRIVIBILI

DESCRIZIONE

CUSCINO ANTIDECUBITO

Utilizzo su sedie normali o carrozzelle. Sono prescrivibili, in alternativa tra loro, a pazienti non deambulanti obbligati alla postura seduta senza soluzione di continuità.

MATERASSO ANTIDECUBITO

Utilizzo su letti normali od ortopedici. Sono prescrivibili a pazienti affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità.

LETTO ORTOPEDICO

Prescrivibile a pazienti affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità.

Non è pertanto prescrivibile ad utenti con carrozzina o deambulatore.

SPONDE

SUPPORTO PER ALZARSI

SOLLEVATORE MOBILE CON IMBRAGATURA

CARROZZINA PIEGHEVOLE AUTOSPINTA

CARROZZINA PIEGHEVOLE DA TRANSITO

RIALZO STABILIZZANTE PER WC

SEDIA COMODA

CODICE

NOTE

03.33.03.003

in fibra cava siliconata

03.33.03.006

in gel fluido

03.33.03.009

in materiale viscoelastico

03.33.06.018

a gonfiaggio alternato

03.33.06.021

ad elementi interscambiabili

18.12.07.003

a una manovella

18.12.07.006

a due manovelle

18.12.27.106

universali

18.12.27.103

per letto ortopedico

12.30.09.103

12.36.03.003

12.21.06.039

largh. seduta cm 38 - 45

12.21.06.036

largh. seduta < cm 38

12.21.06.045


09.12.24.003

12.21.03.003

CUSCINI ANTIDECUBITO

Sono indicati per utenti con basso rischio di sviluppare lesioni da decubito. Da non prescrivere in presenza di lesioni da decubito ischiatiche, coccigee o nella regione inferiore del sacro. In presenza di lesioni da decubito la tipologia di cuscino indicata è quella a bolle d'aria (prescrivibile dallo specialista).

03.3303.003 Cuscino in fibra cava siliconata

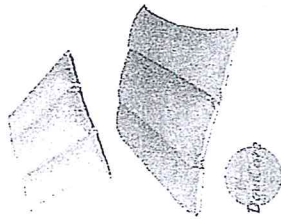

03.33.03.006 Cuscino in gel fluido


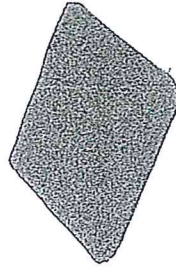


Foto con cover

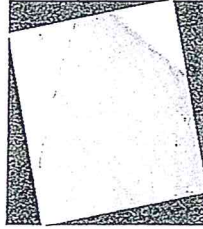


cuscino senza cover

03.33.03.009 Cuscino in materiale viscoelastico compatto




Foto con cover

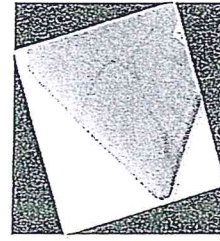

cuscino senza cover

MATERASSI ANTIDECUBITO

03.33.06.018 materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato

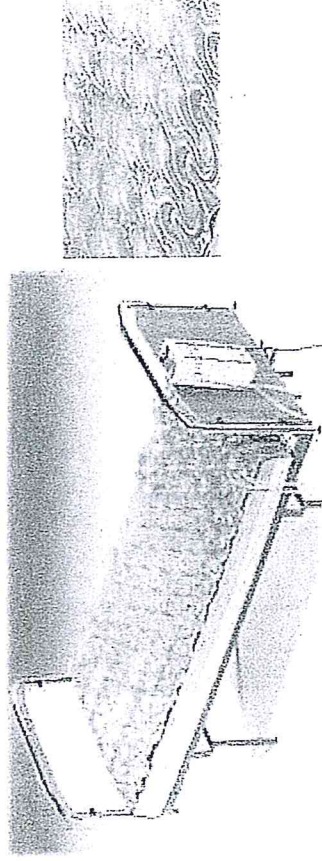

Portata massima 120 kg


Dimensioni cm 190x85 altezza 4 cm

Il sovrasmaterasso è composto da due unità la gomma e il compressore.

La gomma va posizionata sopra al materasso utilizzato dall'utente.

Tale tipologia di materasso ha azione preventiva ed è indicato in presenza di un basso rischio di sviluppare LDD (lesioni da decubito).

03.33.06.021 materasso ad elementi interscambiabili

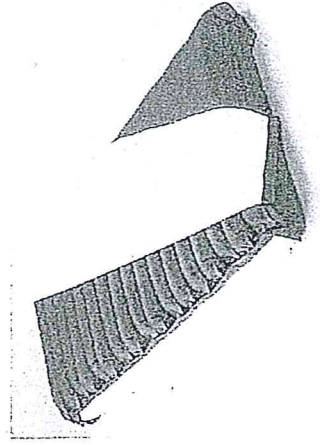


Portata massima 120 Kg Dimensioni cm.200x90 altezza elementi gonfi cm. 13

Il sovrasmaterasso è composto da due unità: la gomma e il compressore.


La gomma va posizionata sopra al materasso utilizzato dall'utente.

Tale tipologia di materasso ha una azione preventiva ed è indicato in presenza di lesioni da decubito fino al III grado

18.12.27.106 sponde universali per letto
utilizzo in un letto singolo e a una piazza e mezzo.
Non posizionabile su letti matrimoniali

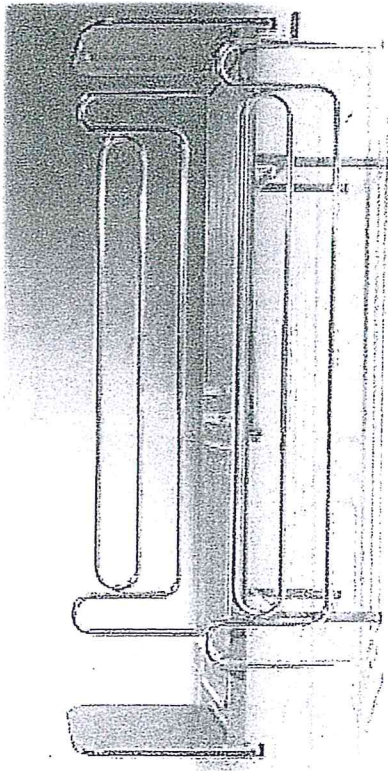

18.12.27.103 sponde per letto ortopedico

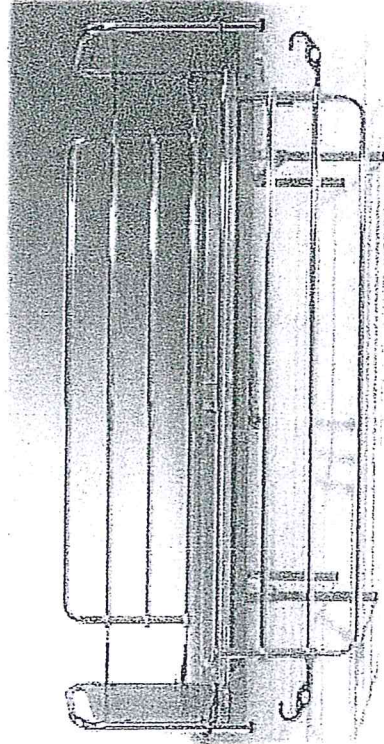


18.12.07.003 Letto ad una manovella regolabile manualmente




Letto articolato ad un movimento, è indicato quando è necessaria solamente la movimentazione della parte superiore del corpo.
Altezza della rete da terra 46 cm.

18.12.07.006 Letto a due manovelle regolabile manualmente

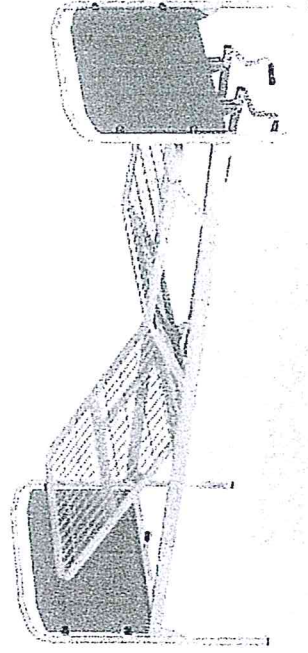


Letto articolato a due movimenti. Indicato quando oltre alla movimentazione della parte superiore del corpo sia necessario modificare anche la posizione degli arti inferiori. Altezza della rete da terra 46 cm.

12.30.09.103 Supporto letto

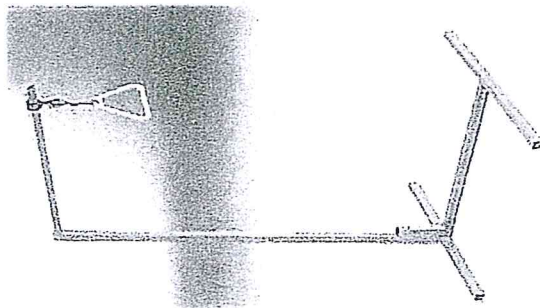

I supporti disponibili sono unicamente con base a terra. Il telaio è smontabile. Va posizionato dietro alla testata del letto. La base va tenuta completamente sotto al letto per evitare rischi di caduta accidentale.


12.36.03.003 Sollevatore mobile manuale ad imbracatura polifunzionale

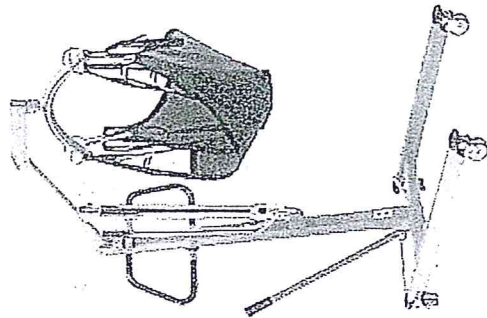

Il sollevatore è indicato nelle situazioni in cui l'utente necessita di una importante assistenza nei trasferimenti; richiede la presenza di 2 operatori: uno che controlli l'assistito e l'altro al controllo del pistone (alla leva di elevazione per la salita o manopola per l'abbassamento).



09.12.24.003 Rialzo stabilizzante per WC

È indicato per il mantenimento di una posizione corretta in tutti i casi in cui le esigenze fisiologiche del soggetto, in condizioni di inerzia o di grave disabilità motoria interessante gli arti e il tronco, richiedono una lunga permanenza sul WC.

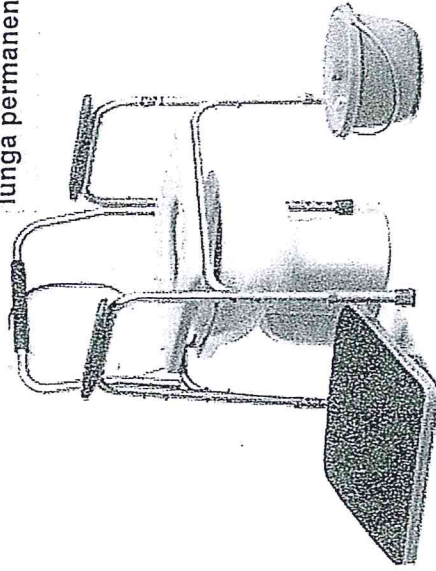

Ha la struttura in alluminio, i braccioli e le gambe regolabili in altezza. Utilizzato con il cestello alloggiato sotto può sostituire la comoda ed essere utilizzato in stanze diverse dal bagno. I quattro appoggi garantiscono una maggiore stabilità rispetto alla comoda. Portata 100 KG.

12.21.03.003 Comoda

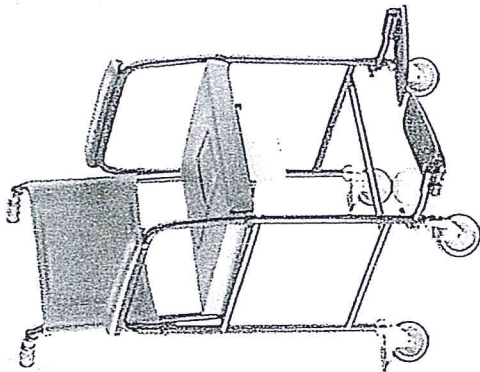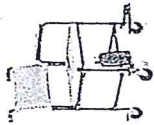

Cin Approv. 12.21.03.003


12.21.03.003
12.21.03.003
12.21.03.003

12.21.03.003
12.21.03.003
12.21.03.003




Ausilio idoneo per facilitare l'espletamento dei bisogni fisiologici e le cure igieniche. La presenza del cestello sottostante ne permette un utilizzo anche in ambiente diverso dal bagno. L'ausilio non è pieghevole e non è idoneo ad un utilizzo in ambiente esterno.

12.21.06.045 carrozzina pieghevole di transito

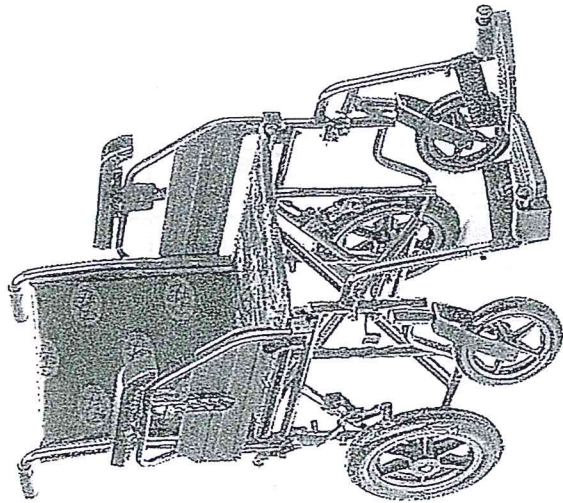

Misure disponibili dalla 38 alla 45 cm
È indicata per utenti non in grado di utilizzare gli arti superiori per l'autospinta.
La carrozzina è idonea per un utilizzo in ambiente interno ed esterno.

12.21.06.039 (036) Carrozzina pieghevole ad autospinta

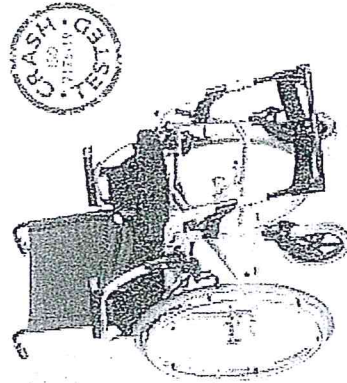

Codice 12.21.06.036: carrozzine con seduta inferiore ai 38 cm (carrozzone per l'età evolutiva)
Codice 12.21.06.039: carrozzine con seduta dai 38 cm a 45 cm

La carrozzina pieghevole ad autospinta è indicata in soggetti con capacità di utilizzare gli arti superiori per la spinta.

PRESCRIZIONE AUSILI ASSISTENZIALI – DGR 1599/2011

Sig.

nato a il

residente a via.....

affetto da

PRESCRIZIONE DI:

			prescr.	firma
CUSCINO ANTIDECUBITO	03.33.03.003	in fibra cava siliconata	<input type="checkbox"/>	
	03.33.03.006	in gel fluido	<input type="checkbox"/>	
	03.33.03.009	in materiale viscoelastico	<input type="checkbox"/>	
MATERASSO ANTIDECUBITO	03.33.06.018	con camera a gonfiaggio alt.	<input type="checkbox"/>	
	03.33.06.021	ad elementi interscambiabili	<input type="checkbox"/>	
LETTO ORTOPEDICO	18.12.07.003	a una manovella	<input type="checkbox"/>	
	18.12.07.006	a due manovelle	<input type="checkbox"/>	
SPONDE	18.12.27.106	universali	<input type="checkbox"/>	
	18.12.27.103	per letto ortopedico	<input type="checkbox"/>	
SUPPORTO PER ALZARSI	12.30.09.103		<input type="checkbox"/>	
SOLLEVATORE MOBILE	12.36.03.003		<input type="checkbox"/>	
CARROZZINA PIEGHEVOLE AUTOSPINTA	12.21.06.039	largh. seduta da 38 a 45 cm	<input type="checkbox"/>	
	12.21.06.036	largh. seduta inferiore cm 38	<input type="checkbox"/>	
CARROZZINA PIEGHEVOLE DA TRANSITO	12.21.06.045		<input type="checkbox"/>	
RIALZO STABILIZZANTE WC	09.12.24.003		<input type="checkbox"/>	
SEDIA COMODA	12.21.03.003		<input type="checkbox"/>	

Data

Il Medico di Medicina Generale
Timbro e firma