

VADEMECUM INDICAZIONI SPECIFICHE PER AUSILI

AUSILI PER L'IGIENE PERSONALE (es.: sedia WC doccia)

- utilizzare unicamente con le finalità indicate nel manuale d'uso;
- si declina l'utilizzo delle sedie wc doccia in presenza di dislivelli (la sedia va utilizzata unicamente con piatti doccia a filo pavimento);
- sanificazione post-utilizzo usando prodotti idonei e non aggressivi (es. nei telai in alluminio non usare sostanze acide);
- sanificare valutando che le superfici vanno a diretto contatto con la cute;
- verificare la stabilità della struttura, che le viti del telaio siano ben serrate e in presenza di ruote non siano presenti impurità.

CARROZZINE ELETTRONICHE/ SISTEMI DI ELETTTRIFICAZIONE/SCOOTER

- si consiglia di stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi;
- allacciare sempre la cintura di sicurezza quando si è seduti in carrozzina e la carrozzina è in movimento;
- spegnere la carrozzina quando non è in movimento e durante i trasferimenti;
- affrontare i dislivelli eliminando la doppia pendenza (mai in diagonale);
- non affrontare dislivelli senza rampe (la carrozzina non può essere utilizzata per superare cordoli e marciapiedi);
- caricare le batterie del sollevatore una volta alla settimana ANCHE SE NON utilizzato per evitare il precoce deterioramento/impossibilità nella ricarica;
- verificare la stabilità della struttura, che le viti del telaio siano ben serrate e nelle ruote non siano presenti impurità.

CARROZZINE MANUALI (autospinta e transito)


- attenersi, durante l'utilizzo, alle indicazioni fornite dall'operatore in fase di consegna;
- utilizzare la carrozzina con le apposite pedane;
- nelle carrozzine con le gommature pneumatiche controllare la corretta pressione delle camere d'aria per assicurare la sicurezza della frenata della carrozzina;
- verificare la stabilità della struttura, che le viti del telaio siano ben serrate e nelle ruote non siano presenti impurità.

CUSCINI CON FLUIDI AUTOMODELLANTI/ BOLLE D'ARIA

- attenersi, durante l'utilizzo, alle indicazioni riportate nel manuale d'uso;
- fare attenzione nel maneggiare oggetti acuminati (aghi, forbici, coltelli, etc.) in prossimità del sistema antidecubito, perché si può facilmente forare la sacca/bolle;
- sanificare al bisogno la cover.

DEAMBULATORI

- attenersi, durante l'utilizzo, alle indicazioni fornite dall'operatore in fase di consegna;
- verificare la stabilità della struttura, che le viti del telaio siano ben serrate e nelle ruote non siano presenti impurità.

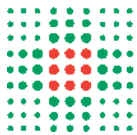

LETTI A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA

- *attenersi, durante l'utilizzo, alle indicazioni riportate nel manuale d'uso (che va conservato in prossimità del letto e riconsegnato all'Ausl);*
- *la presa elettrica a cui verrà collegato il letto deve rispondere alle normative vigenti;*
- *nella movimentazione assicurarsi che i fili non tocchino terra con possibilità di essere danneggiati;*
- *verificare la stabilità della struttura, che le viti del telaio siano ben serrate e nelle ruote non siano presenti impurità.*

LETTI A MOVIMENTAZIONE MANUALE

- *non modificare le altezze della testata/pediera. L'altezza del letto è "regolamentata" dalla legge 81/2008 (e successive modifiche) sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sicurezza degli operatori;*
- *nella movimentazione della rete (testata e arti inferiori) seguire le indicazioni di rotazione indicati sul telaio per evitare di spanare le viti.*

MONTASCALE MOBILI


- *attenersi, durante l'utilizzo, alle istruzioni all'uso fornite dall'operatore;*
- *il montascale va manovrato unicamente dalla persona istruita all'uso (addestrata al momento della consegna);*
- *il montascale va utilizzato unicamente nella scala che il geometra comunale e il tecnico ortopedico hanno fatto il rilevamento ambientale;*
- *caricare le batterie del montascale con le modalità indicate in fase di consegna e comunque una volta alla settimana ANCHE SE NON utilizzato per evitare il precoce deterioramento/impossibilità nella ricarica;*
- *la presa elettrica in cui verrà ricaricato il montascale deve rispondere alle normative vigenti.*

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE

- *attenersi, durante l'utilizzo, alle indicazioni fornite dall'operatore in fase di consegna;*
- *utilizzare l'ausilio con le personalizzazioni e gli aggiuntivi presenti;*
- *nei modelli con le gommature pneumatiche controllare la corretta pressione delle camere d'aria per assicurare la sicurezza della frenata della carrozzina;*
- *verificare la stabilità della struttura, che le viti del telaio siano ben serrate e nelle ruote non siano presenti impurità.*

SOLLEVATORI

- *attenersi, durante l'utilizzo, alle indicazioni riportate nel manuale d'uso (che va conservato in prossimità del sollevatore e riconsegnato all'Ausl);*
- *caricare le batterie del sollevatore una volta alla settimana ANCHE SE NON utilizzato per evitare il precoce deterioramento/impossibilità nella ricarica;*
- *la presa elettrica in cui verrà ricaricato il sollevatore deve rispondere alle normative vigenti*
- *controllare non siano presenti impurità nelle ruote a garanzia del pivottamento e facilità di manovra;*
- *verificare la stabilità della struttura e che le viti del telaio siano ben serrate;*
- *avere ben chiari: il funzionamento dei sistemi di discesa d'emergenza e l'utilizzo del tasto di emergenza;*
- *nella movimentazione utilizzare le apposite manopole, non trazionare i cavi e assicurarsi che questi non siano a terra con possibilità di essere danneggiati;*
- *si ricorda che il sollevatore va utilizzato unicamente per il trasferimento (es letto-carrozzina) e non per la mobilità (es: passaggio da una stanza all'altra);*
- *sanificare le imbragature al bisogno e verificarne periodicamente l'integrità.*

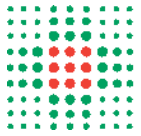

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

SOVRAMATERASSI ANTIDECUBITO

- *attenersi, durante l'utilizzo, alle indicazioni riportate nel manuale d'uso (che va conservato in prossimità del letto e riconsegnato all'Ausl);*
- *posizionare il sovrmaterasso antidecubito ESCLUSIVAMENTE su un materasso "standard" (materasso non erogabile dal SSN) e non direttamente sulla rete;*
- *fare attenzione nel maneggiare oggetti acuminati (aghi, forbici, coltelli, etc.) in prossimità del sistema antidecubito, perché si può facilmente forare;*
- *la presa elettrica a cui verrà collegato il compressore deve rispondere alle normative vigenti.*